

KIT DE COLETA ONLINE

Informações do Cliente:

Nome: _____

Informações da Ave:

Preenchimento obrigatório

Identificação (nome, gaiola, chip, anilha, etc): _____ Data Nasc: _____

Preenchimento obrigatório

Espécie (nome científico ou comum): _____

Pai: _____ Mãe: _____

Nome caso macho: _____ Nome caso fêmea: _____



Nome do Proprietário ou Empresa (se diferente do cliente): _____

Dobre na linha Pontilhada

Dobre na linha Pontilhada


Na sexagem de aves por DNA você poderá coletar penas ou sangue

Atenção: utilizar um kit por ave. Nunca colocar amostra de duas aves em um mesmo kit de coleta.
Para coleta de penas - Identificação da Ave*:

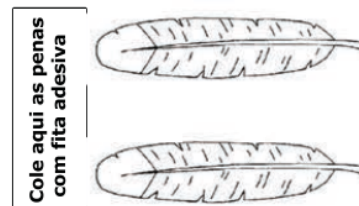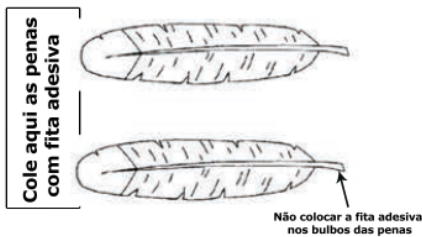

OU

Para coleta de Sangue - Identificação da Ave*:

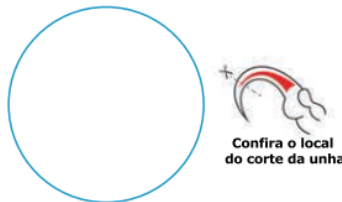

Dobre na linha Pontilhada

Dobre na linha Pontilhada

PASSO A PASSO PARA A COLETA DE PENAS E/OU SANGUE

ANTES DE COMEÇAR A COLETA, PREENCHA OS DADOS DA AVE E VERIFIQUE SE OS DADOS DO KIT CONFEREM COM OS DADOS DA AVE A SER COLETADA.

Pena:

1. Com a ave sob controle, retire 6 penas da região da cloaca ou 14 penas do peito.
2. Cole as penas na posição e local indicados com a ajuda de uma fita adesiva (durex ou fita crepe).
3. Nunca toque os bulbos das penas, pois é nele que está o material genético e tocar no bulbo pode comprometer o exame.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE PENAS QUE ESTEJAM CAÍDAS NA GAIOLA.

Sangue:

1. Com a ave sob controle, utilizando um cortador de unha ou tesourinha, corte aproximadamente 1/3 da unha da ave.
2. Massageando o dedo da ave, pingue as gotas de sangue no círculo indicado.
3. Deixe o kit secar à sombra, em temperatura ambiente por 30 minutos antes de dobrar.

ATENÇÃO: COM ALGODÃO OU GAZE EMBEBIDO EM ÁLCOOL, LIMPAR O CORTADOR/TESOURINHA ENTRE A COLETA DE CADA AVE.

DOBRAR O KIT NOS LOCAIS INDICADOS PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS AMOSTRAS E ENVIAR POR CORREIOS PARA:

Endereço


Avenida Itororó, 405 - Zona 2


CEP 87010-460 Maringá - PR

 www.ampligen.com.br

 contato@ampligen.com.br

  [ampligen.biotec](https://www.instagram.com/ampligen.biotec)

 (44) 3029.9660

 (44) 98836.6978

